

EasyTreat palkitsee avustajakoiran

Pieni palkkio ohjaa avustajakoiran toimintaa oikeaan suuntaan ja pitää koiran tyytyväisenä. Palkkio kannustaa koira ja on selkeä merkki siitä, että työ on tehty oikein.



Palkitse avustajakoira oikealla hetkellä

Hyvä palkinto avustajakoiralle

Sopiva palkinto avustajakoiralle on motivoiva, muttei liikaa huomiota. Herkuilla palkitseminen on usein käytännöllisin tapa avustajakoiran palkitsemiseen. Silloin koiran pystyy palkitsemaan lähietäisyydellä hallitusti ja koira on nopeasti jälleen valmis jatkamaan töitä.

Palkitseminen voi olla vaikeaa

Fyysisten rajoitteiden vuoksi namipalkkion antaminen koiralle ei ole aina mahdollista tai riittävän helppoa. Nameja voi olla vaikea antaa nopeasti ja ne saattavat päätyä hankalaan paikkaan.

Helppo tapa antaa palkinto

Erityisesti avustajakoiraikäyttäjille suunniteltu EasyTreat on hyvä ratkaisu palkitsemisongelmaan. Pyörätuoliin kiinnitettäväksi suunniteltu automaatti antaa yhden napin painalluksella koiralle palkkion helposti ja sujuvasti. Laitte on erityisen hyvä apu itsenäisesti pyörätuolilla liikkuville avustajakoiran käyttäjille.

Miten EasyTreat toimii?

Automaattiin syötetään valmiiksi herkkutanko ja palkitsemishetkellä laite katkaisee tangosta sopivan kokoisen siivun, joka tipahtaa laitteen kaukaloon koiran ulottuville. Napin painalluksesta kestää noin 5 sekuntia palkinnon putoamiseen, joten palkitseminen on nopeaa ja helppoa ajoittaa oikein.

EasyTreat kiinnitetään pyörätuoliin

Easytreatin voi kiinnittää sekä sähköisiin että manuaalisiin pyörätuolimalleihin. Pyörätuoliin asennetaan Grip-Rose-kiinnike, johon EasyTreat-laite painetaan kiinni. Laitte irrotetaan kiinnikkeestä helposti vipua kääntämällä. Kiinnikkeitä voi olla valmiiksi useammassa pyörätuolissa, tai eri puolilla tuolia.

Palkinto yhtä nappia painamalla

Laitteeseen kuuluu suuri pyöreä langallinen painike, jota painamalla laite antaa koiralle palkkion. Painikkeen voi kiinnittää hihnalla esim. käsinojaan tai niskatukeen. Langaton painike on saatavilla lisävarusteena.

Palkinto

EasyTreatissa voi käyttää 10-20 cm pitkiä ja 6-12 mm paksuja pyöreähköjä herkkutankoja, joita saa marketeista ja lemmikkikaupoista.

Pakkauksessa mukana

- EasyTreat-laite
- 2 GripRose-kiinnikettä
- Langallinen painike ja kiinnityshihna
- Latausjohto

Tekniset tiedot:

- Mitat LxKxS= 125x285x90 mm
- Paino 1,2 kg
- Painonapin johdon pituus 1 m
- Palkintotangon paksuus: 6 - 12 mm
- Palkintotangon pituus: 10 - 20 cm
- Akun kesto: 1 - 2 viikkoa käytöstä riippuen
- Ulkokuoren materiaali: POM/iskunkestävä polystyreeni



EasyTreat

